

Zur Ihrer Information: Aktuell arbeiten wir an unserem neuen Webshop, daher werden Sie wie unten beschrieben, den Menüpunkt „Lizenzen“ nicht finden. Bei einer Bestellung dieser Software, müssen wir derzeit den Download Link manuell an Sie versenden.


PlauderPaula – Wie komme ich an mein Programm?

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für "PlauderPaula", die Software zu Therapie von Aussprachestörungen der Laute "SCH, S, F, K, T, G, R" und zur Förderung der Phonologischen Bewusstheit entschieden haben!


Wie kommen Sie aber nun an Ihre Software und können gleich loslegen?

1. Nach Bestätigung Ihrer Bestellung klicken Sie bitte oben auf "Mein Konto", wählen Sie dann im Drop-Down-Menü den Punkt "Lizenzen" aus. Hier sollten Sie nun die erworbene Lizenz "PlauderPaula" vorfinden.
2. Klicken Sie auf den Button "Downloaden", um die Software auf Ihren Computer herunterzuladen.
3. Sie finden nun auf Ihrem Computer (üblicherweise im Ordner "Downloads") eine Zip-Datei (komprimierter Ordner) "PlauderPaula". Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf diese Datei und wählen Sie "Entpacken". Es erscheint ein zweiter Ordner, in diesem befinden sich zwei Dateien: Eine Installationsdatei "PlauderPaula Setup" und eine Textdatei mit Ihrem Passwort.
4. Doppelklicken Sie auf die "PlauderPaula Setup"-Datei, dann werden Sie nach Ihrem Passwort gefragt. Geben Sie dieses aus der Textdatei im entsprechenden Fenster ein (abtippen oder hineinkopieren).

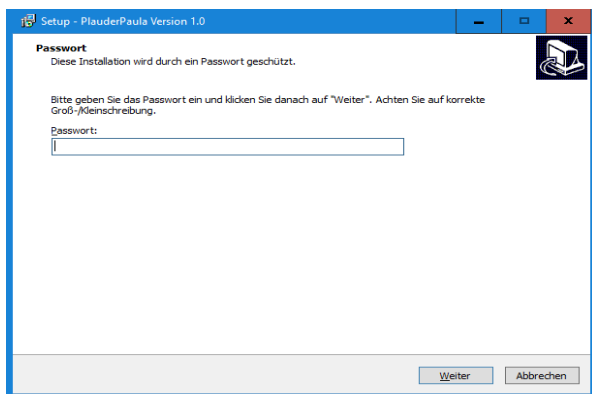


5. Wählen Sie den Ordner/Ort, wohin das Programm installiert werden soll.

6. Wählen Sie aus, ob ein Symbol/Icon für das Programm erscheinen soll.

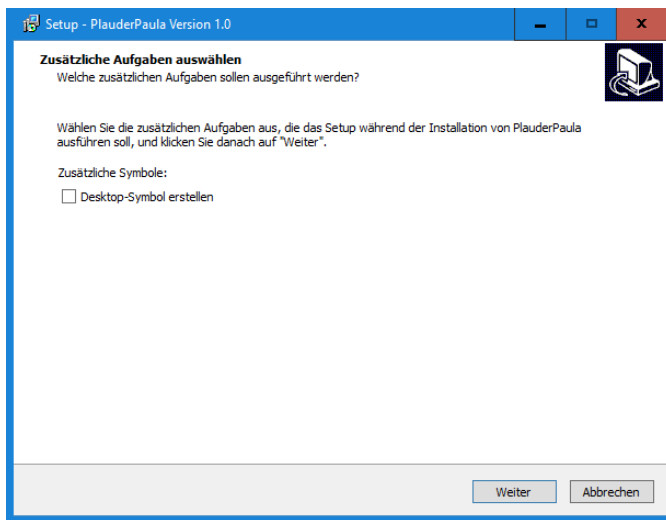

7. Das Programm "PlauderPaula" wird nun am entsprechenden Ort installiert und ist dort zu finden. Haben Sie zuvor ausgewählt, dass ein Symbol/Icon erscheinen soll, ist dieses nun an der gewählten Stelle zu finden.

8. Sie können nun nach Abschluss der Installation sofort das Programm starten ...

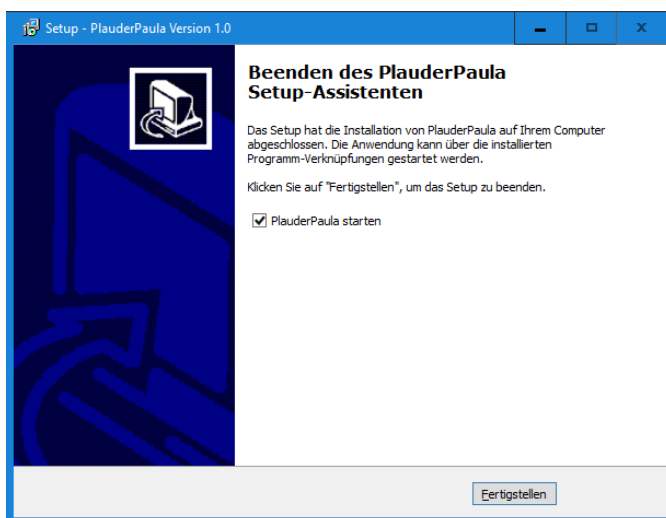

... oder später jederzeit durch Doppelklicken auf das erwähnte Symbol/Icon mit dem Üben beginnen.

Viel Spaß mit "PlauderPaula" wünscht

Ihr Team von ProLog